

Kit4Cat

CAT URINE SAMPLE COLLECTION KIT
Revolutionary hydrophobic sand that keeps the urine on top making sample collection easy!




¿Qué es Kit4Cat?

Kit4Cat luce, huele y se siente como una arena real, por lo que los gatos no se quejan y les encanta. Las propiedades hidrofóbicas mantienen la orina del gato en la parte superior, lo que hace que la recolección de muestras sea fácil, indolora y sin estrés. Permite a los veterinarios, técnicos y dueños de gatos recolectar rápida y fácilmente la muestra de orina de un gato, sin tener que recurrir a procesos invasivos como la cistocentesis.



1 Verter en la arena

Vierta toda la arena hidrofóbica en una caja de arena limpia y vacía.

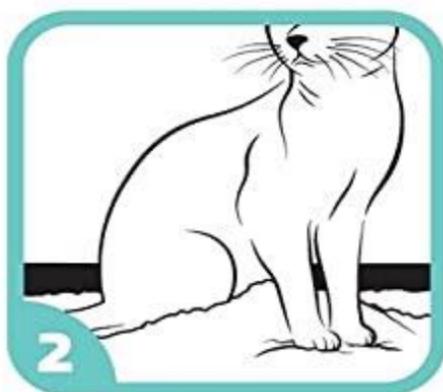

2 Espera a tu gato

Permita que su gato orine libremente en la arena.



3 Recoge las muestras

Recoja fácilmente la orina de la parte superior de la arena con la pipeta.



4 Llenar el vial

Llene el vial con la pipeta hasta al menos $\frac{1}{2}$.



5 Guardar la muestra

Si es necesario, cierre el vial con el tapón y guárdelo en el frigorífico.



6 Análisis adicionales

Lleve la muestra al veterinario para más información.

